# Dermabond colle cutanée - mini - 0,36 ml Retout à la page d'accueil

## (12 pcs)

Art: 9102132 | Marque: ETHICON

Cayer image or type unknown

## Informations sur le produit

DERMABOND est **une colle cutanée avancée** qui peut être utilisée comme **alternative à une suture** pour fermer une plaie. AVANTAGES

- Forme une couche anti-bactérienne qui protège la plaie pendant 72 heures.
- L'application prend 1 minute, ce qui permet de fermer les plaies plus rapidement que les sutures classiques.
- Pour les enfants, la colle est moins effrayante que le fil et l'aiguille
- L'anesthésie locale n'est pas nécessaire
- En 4 minutes, le Dermabond protège également la plaie contre l'eau, donc la douche n'est pas un problème (ne pas nager !).
- Esthétiquement, vous obtenez un meilleur résultat qu'avec une suture classique.
- Conservation jusqu'à 30° maximum (pas nécessairement au réfrigérateur).

### COMMENT L'APPLIQUER?

- Nettoyer et désinfecter la plaie
- Casser l'ampoule de Dermabond en la pressant fortement entre le pouce et l'index il ne vous reste plus que quelques minutes pour l'appliquer!
- Veillez à ce que les bords de la plaie soient bien rapprochés (en position horizontale).
- Appliquer une première couche et laisser sécher pendant 30 secondes.
- Appliquer une deuxième couche et laisser sécher pendant 30 secondes, puis maintenir les bords de la plaie ensemble pendant 60 secondes.
- Prêt!

Avec 1 ampoule de 0,36 ml, vous pouvez fermer une plaie d'environ 4 cm de long (max.). Après 5 minutes, une compresse peut être appliquée pour protéger la blessure des chocs ou des frottements. UNE BLESSURE PROFONDE ?

- Si la plaie est trop profonde, **une suture sous-cutanée** est en outre nécessaire avant la fermeture superficielle (comme pour une fermeture complète avec des sutures).
- L'intention **n'est pas de laisser l'adhésif s'infiltrer dans la plaie**, mais seulement de l'appliquer superficiellement.

#### BLESSURE HUMIDE OU SALE?

C'est une contre-indication pour le Dermabond