



Informations sur le produit

Le Cone facilite l'enroulement d'un bas de compression sur le **Rolly**. Par ailleurs, le Cone permet de dérouler sans effort le bas de compression médical du Rolly. Fixez le Cone sur une surface lisse (basculer le levier, le Cone se fixe par aspiration). Ne pas fixer le Cone sur des surfaces délicates, car cela pourrait laisser des traces de caoutchouc. Après utilisation, retirer le Cone de la surface.

Indications:

- rhumatisme des doigts et/ou des mains
- réduction de la force et/ou de la douleur dans les mains