Dermabond colle cutanée - 0,5 ml (6 pcs) Retout à la page d'accueil

Art: 9100132 | Marque: ETHICON

Cayer image or type unknown

Informations sur le produit

DERMABOND est une colle cutanée avancée qui peut être utilisée comme alternative à une suture pour fermer une plaie.

AVANTAGES

- Forme une **couche anti-bactérienne** qui protège la plaie pendant 72 heures.
- L'application prend 1 minute, ce qui permet de fermer les plaies plus rapidement que les sutures classiques.
- Pour les enfants, la colle est moins effrayante que le fil et l'aiguille.
- L'anesthésie locale n'est pas nécessaire.
- En 4 minutes, le Dermabond protège également la plaie contre l'eau, donc la douche n'est pas un problème (ne pas nager !).
- Esthétiquement, vous obtenez un meilleur résultat qu'avec une suture classique.
- Conservation jusqu'à 30° maximum (pas nécessairement au réfrigérateur).

COMMENT L'APPLIQUER?

- Nettoyer et désinfecter la plaie.
- Casser l'ampoule de Dermabond en la pressant fortement entre le pouce et l'index il ne vous reste plus que quelques minutes pour l'appliquer!
- Veillez à ce que les bords de la plaie soient bien rapprochés (en position horizontale).
- Appliquer une première couche et laisser sécher pendant 30 secondes.
- Appliquer une deuxième couche et laisser sécher pendant 30 secondes, puis maintenir les bords de la plaie ensemble pendant 60 secondes.
- Prêt!

Avec 1 ampoule de 0,50 ml, vous pouvez fermer une plaie d'environ 5 - 6 cm de long (max.). Après 5 minutes, une compresse peut être appliquée pour protéger la blessure des chocs ou des frottements.

UNE BLESSURE PROFONDE?

- Si la plaie est trop profonde, **une suture sous-cutanée** est en outre nécessaire avant la fermeture superficielle (comme pour une fermeture complète avec des sutures).
- L'intention n'est pas de laisser l'adhésif s'infiltrer dans la plaie, mais seulement de l'appliquer superficiellement.

BLESSURE HUMIDE OU SALE?

• C'est une contre-indication pour le Dermabond.