Film Barrière - 3M Cavilon - 28 ml

Retour à la page d'accueil

Art: 575942 | Marque: 3M

Coverimage or type unknown

Informations sur le produit

Le film barrière 3M Cavilon est un film concentré qui est vaporisé sur la peau pour la **protéger contre irritations**. Un deuxième effet du spray est que le **tape colle mieux sur la peau** et donne donc un effet prolongé.

UTILISATION

- Nettoyez la peau et laissez-la bien sècher, le Cavilon n'adhère que sur une **peau sèche**.
- Quand vous utilisez le spray, tenir la tête du flacon à 10 à 15 cm de la peau et faire un mouvement fluide pour égaliser le film sur la surface sensible.
- Laissez sécher 30 secondes.
- Si nécessaire répétez l'appliquation et laissez sécher 30 secondes.
- Dans les plis cutanés : écartez bien les plis et laissez bien sécher avant de relacher la peau dans sa position initiale.
- Normalement ce n'est pas nécessaire d'enlever le film si nécessaire, utilisez de l'huile douce.

Faites attention que le produit ne soit pas appliqué sur une blessure ouverte. En cas d'utilisation comme protection contre irritations : appliquez à nouveau après 48h ou après 3 lavages.